





Техника выполнения подкожной инъекции

(Анимированный лого «нетакимаб»)

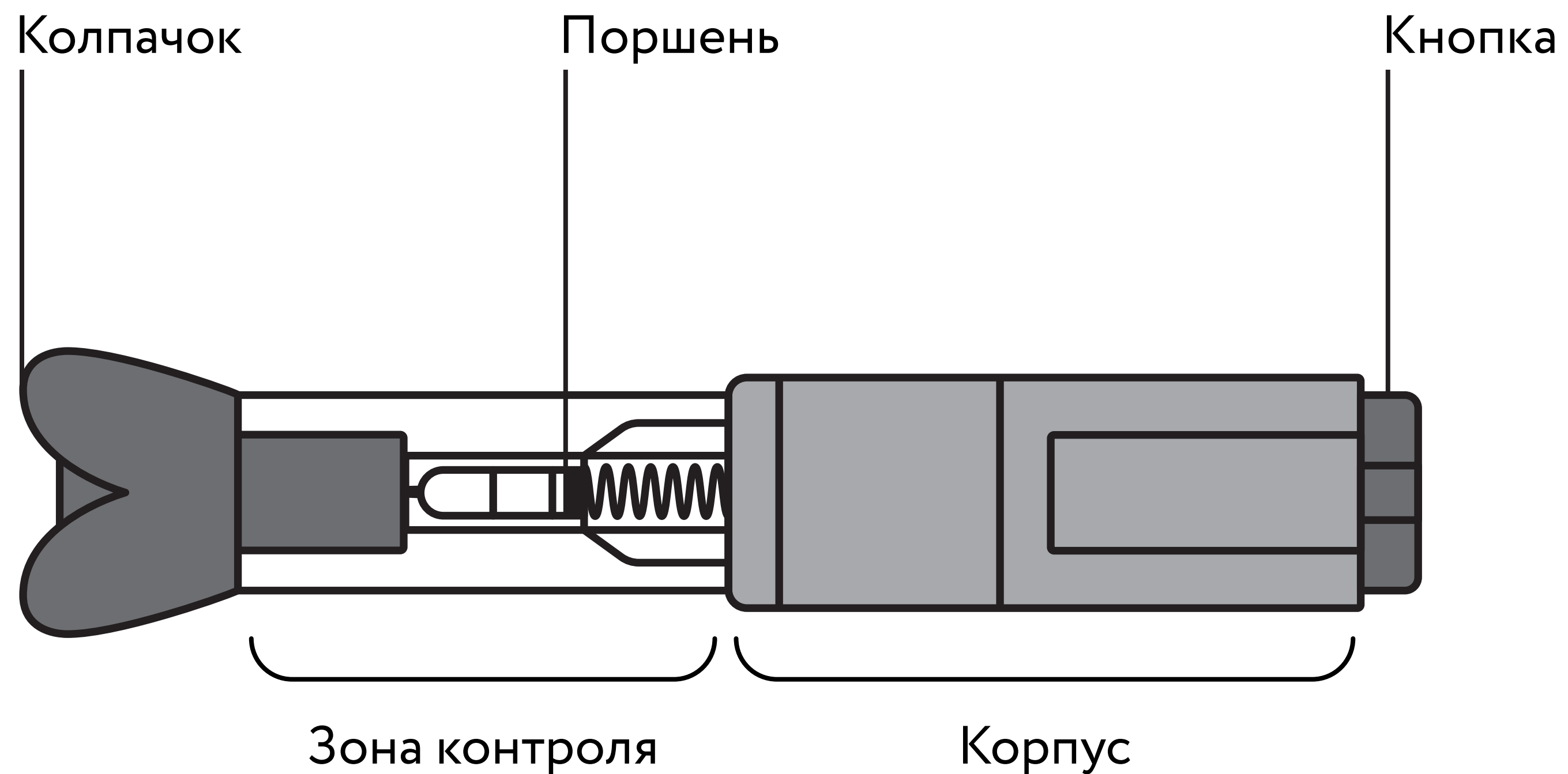


Устройство автоинжектора.
Автоинжектор не встряхивать.

Не снимайте защитный колпачок с автоинжектора до выполнения инъекции!
(Инжектор в закрытом состоянии)

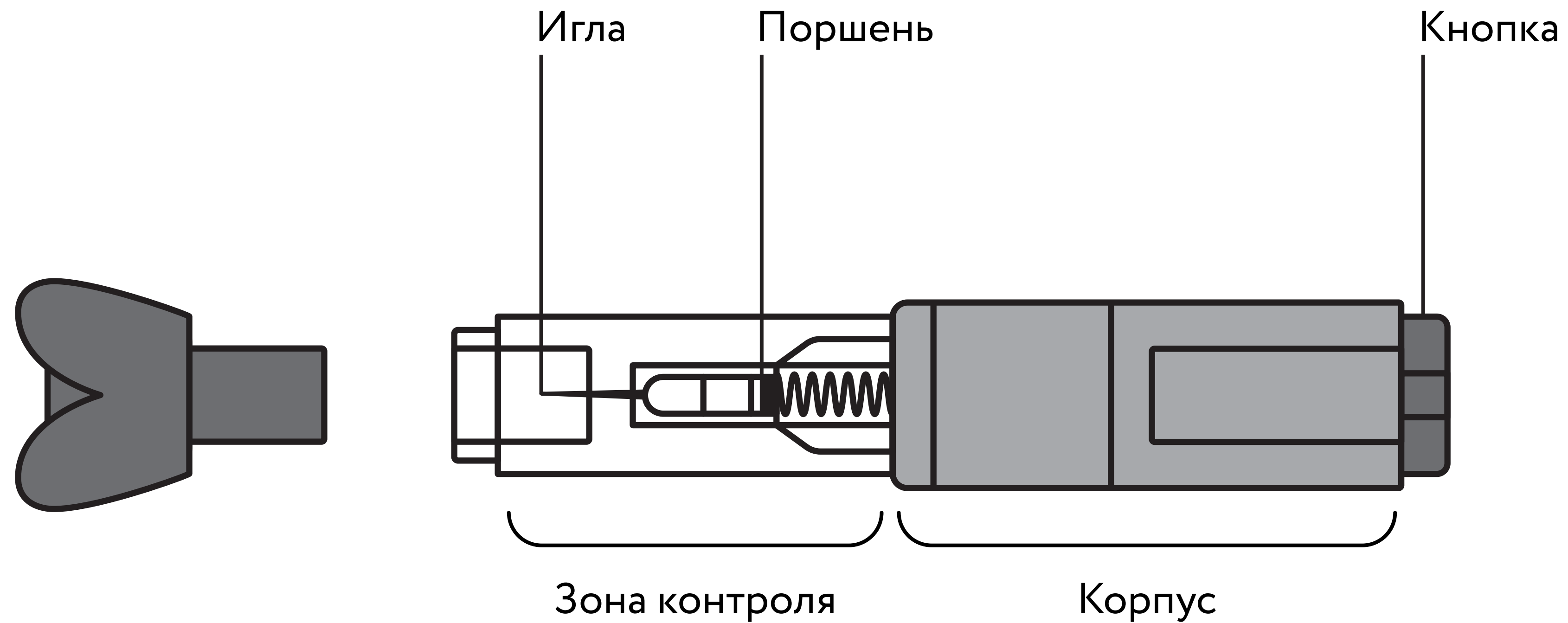


Устройство автоинжектора.
Автоинжектор не встряхивать.


Не снимайте защитный колпачок с автоинжектора до выполнения инъекции!
(Колпачок открывается влево, появляется указатель иглы).

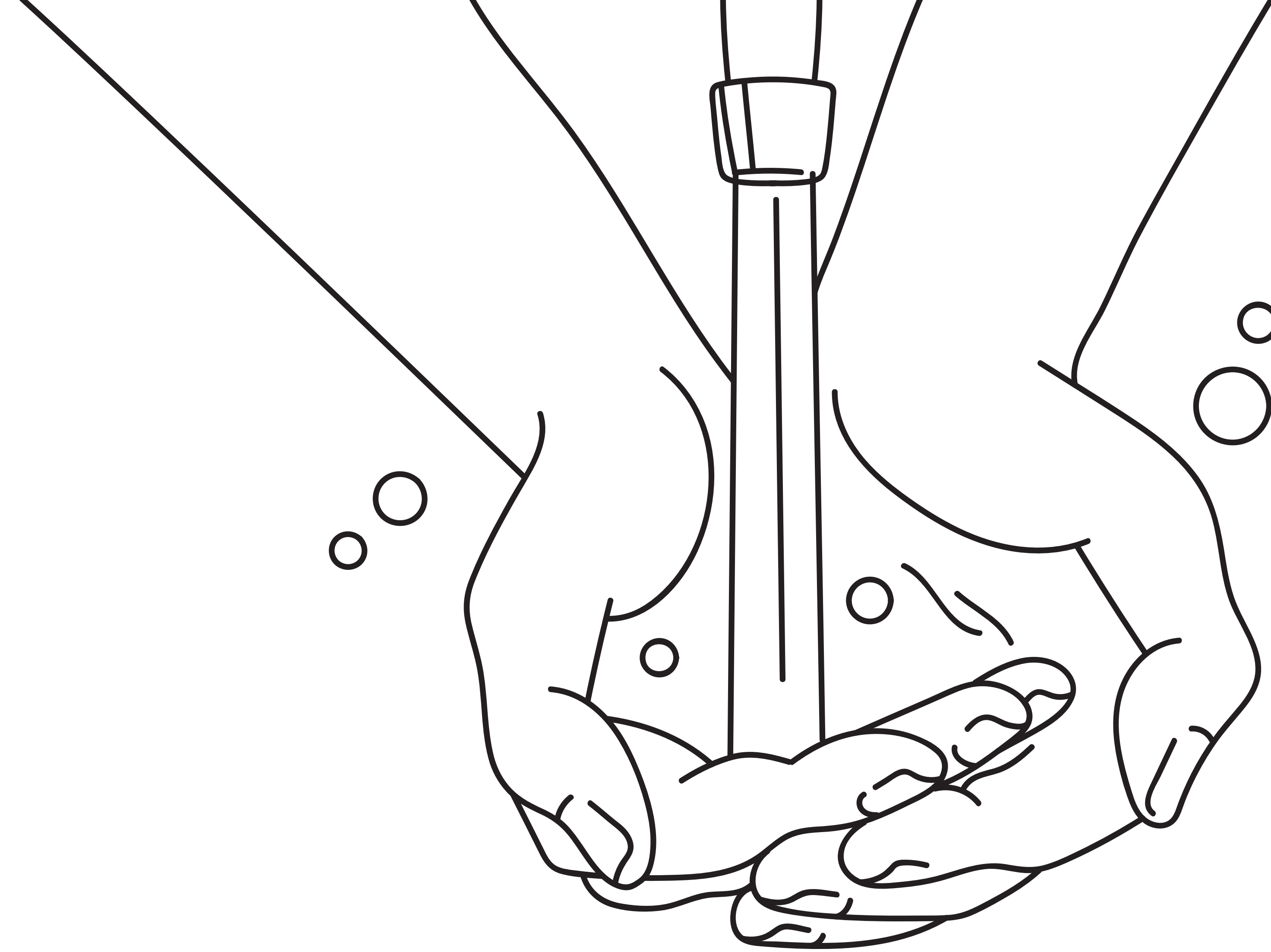


Тщательно вымыть руки

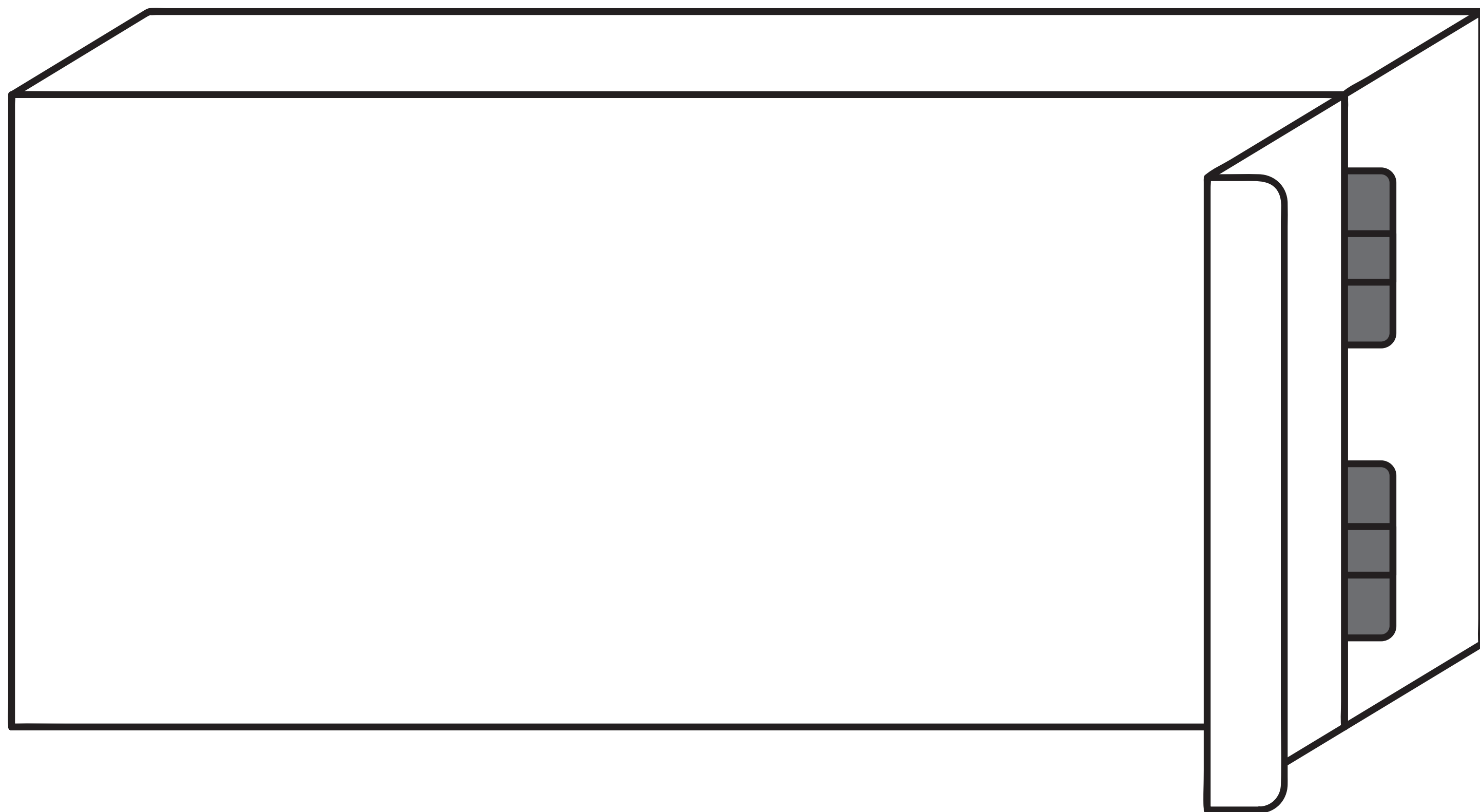


Извлечь два автоинжектора из упаковки.
(Автоинжекторы выезжают из упаковки)

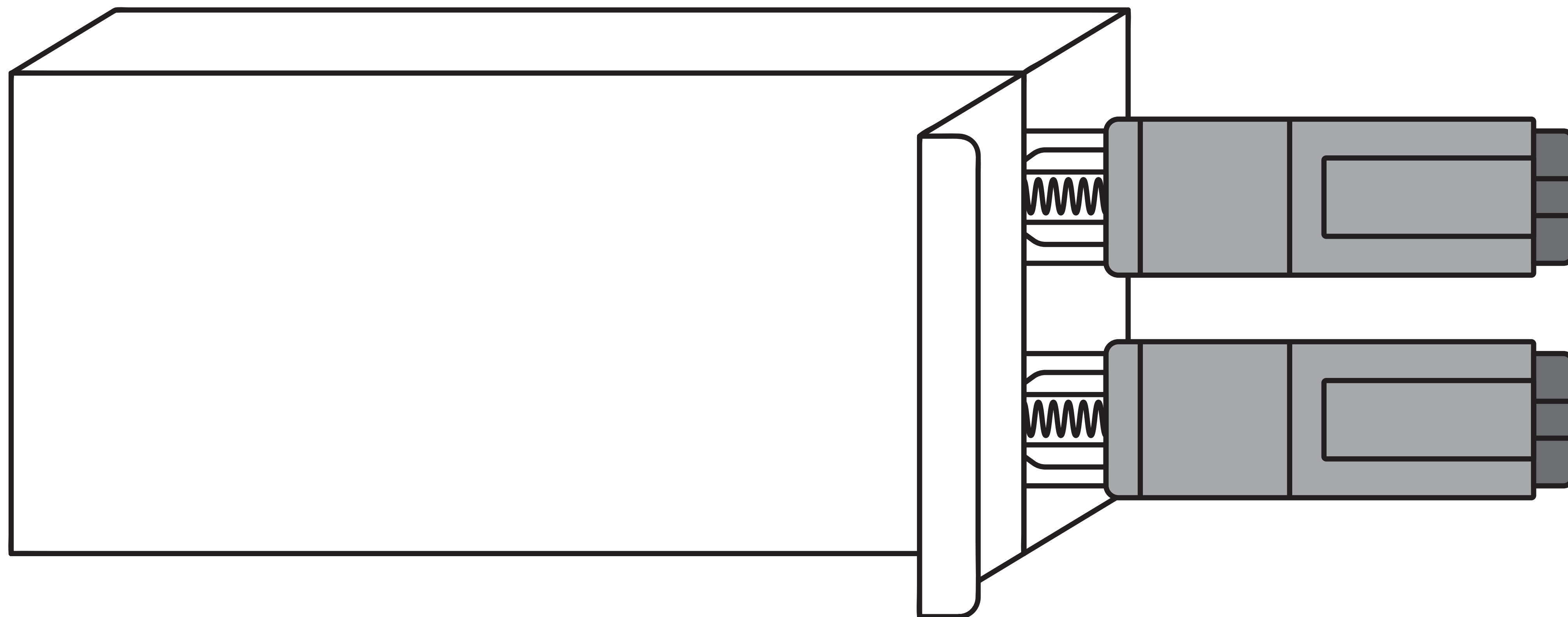


Извлечь два автоинжектора из упаковки.
(Автоинжекторы выезжают из упаковки)

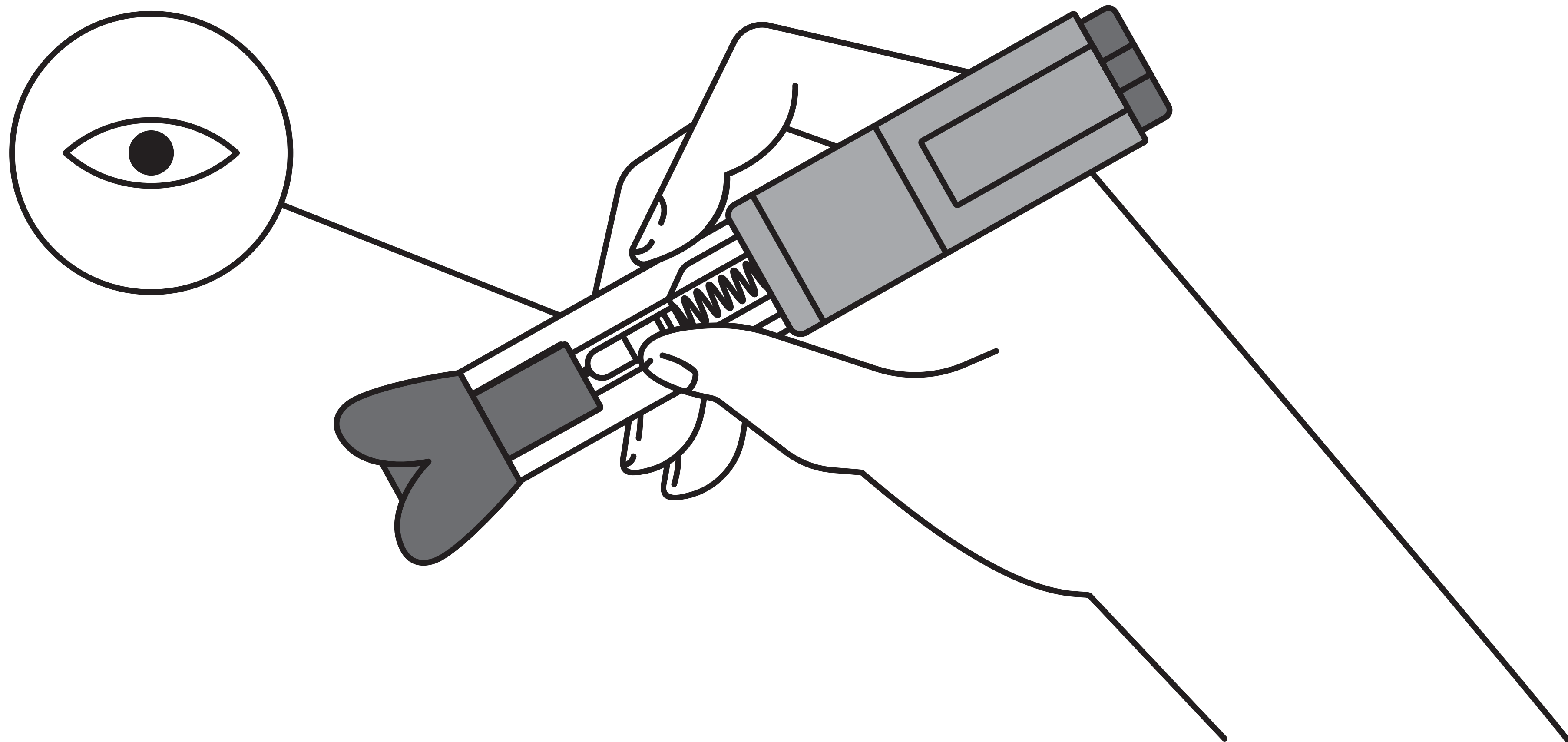


Проверьте срок годности по маркировке на упаковке, оцените целостность автоинжекторов и состояние раствора через зону контроля. Не используйте в случае повреждения, истечения срока годности или изменения состояния раствора.

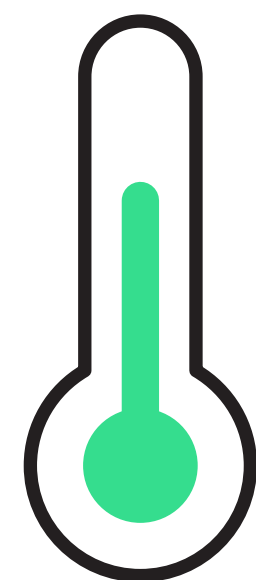

25-30
минут

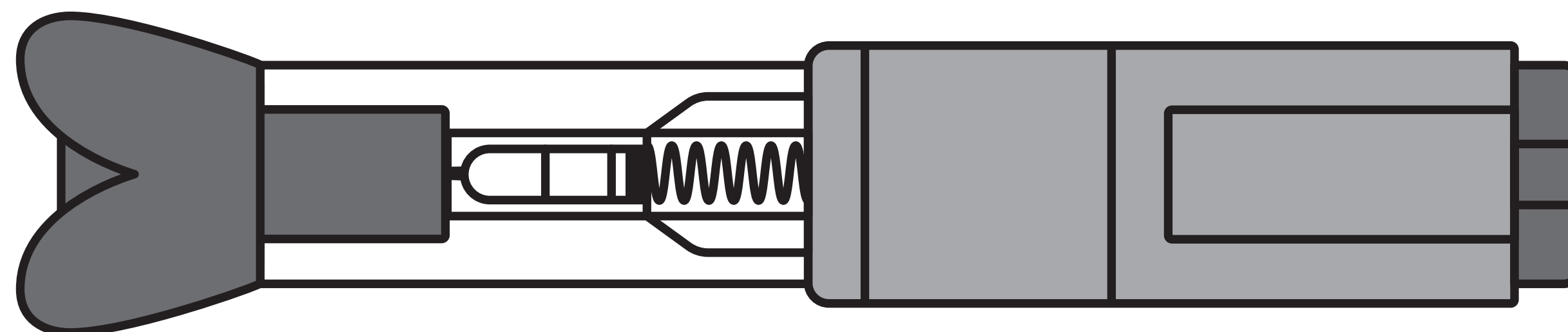


Оставьте автоинжекторы на чистой поверхности
при комнатной температуре в течение 25-30 минут
(Столбик в термометре движется вверх)

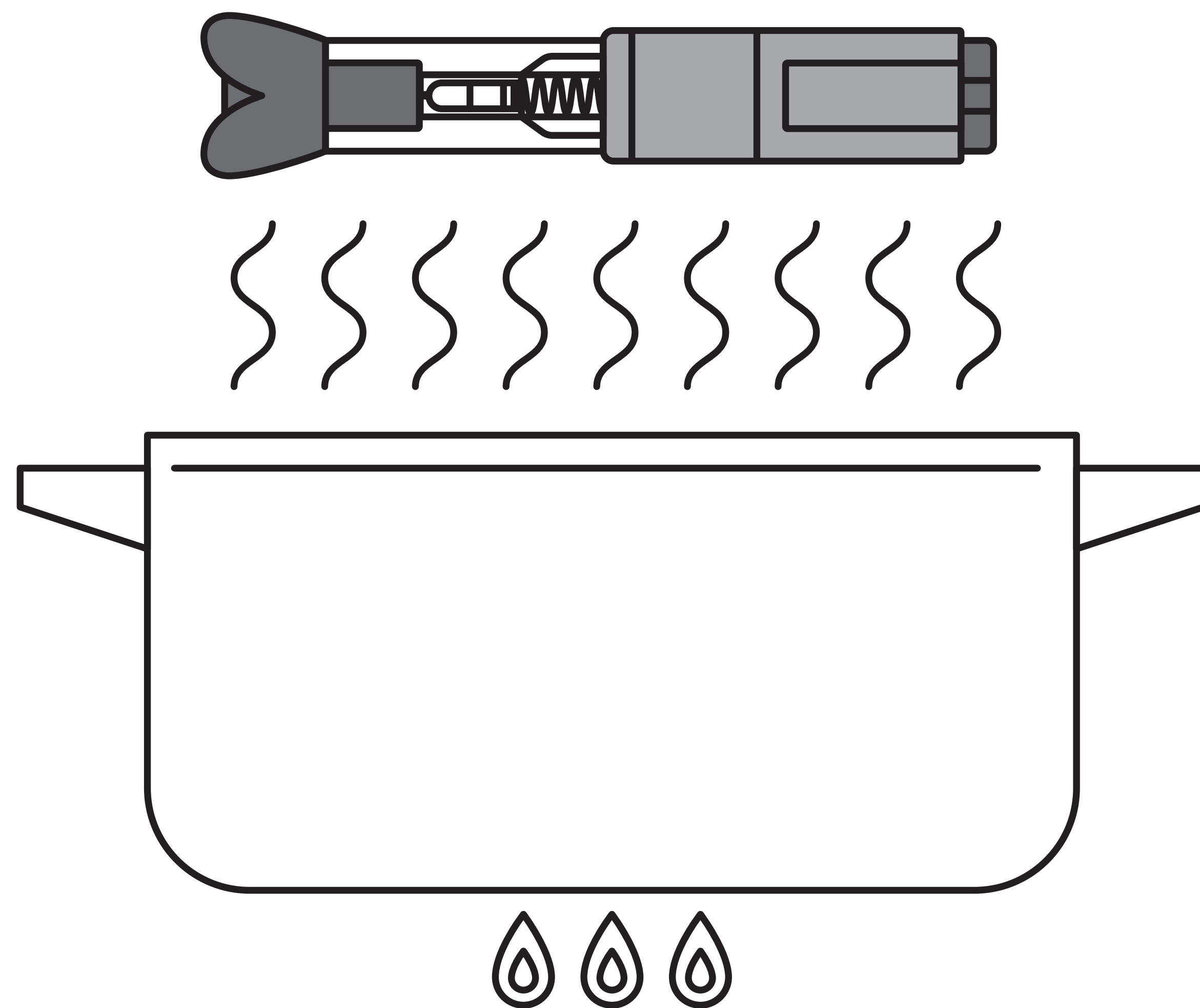


Не следует согревать автоинжекторы
каким-либо другим способом


(Огоньки дрожат, пар двигается, автоинжектор спускается к кастрюле сверху)

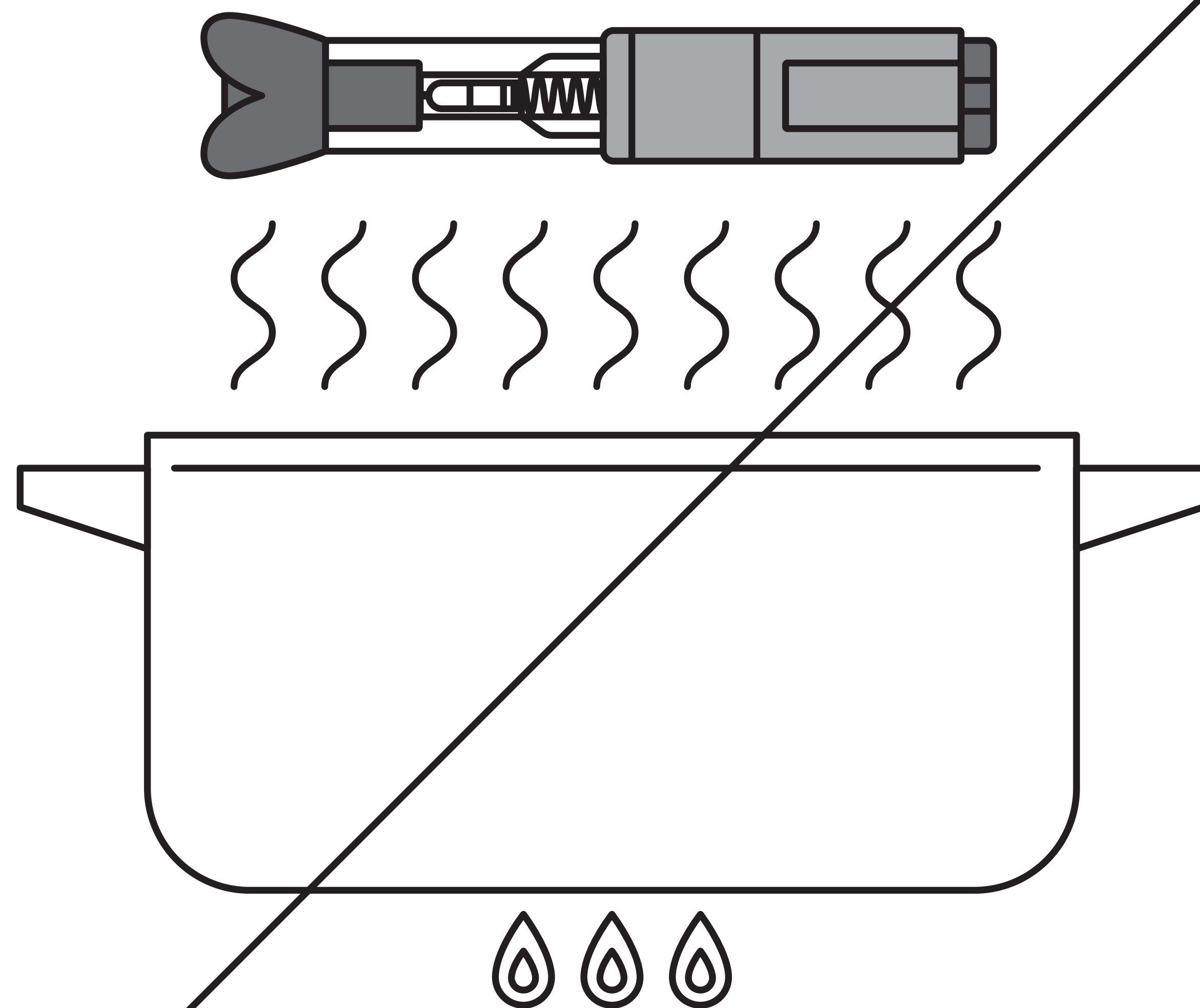


Не следует согревать автоинжекторы
каким-либо другим способом
(Изображение перечеркивается)

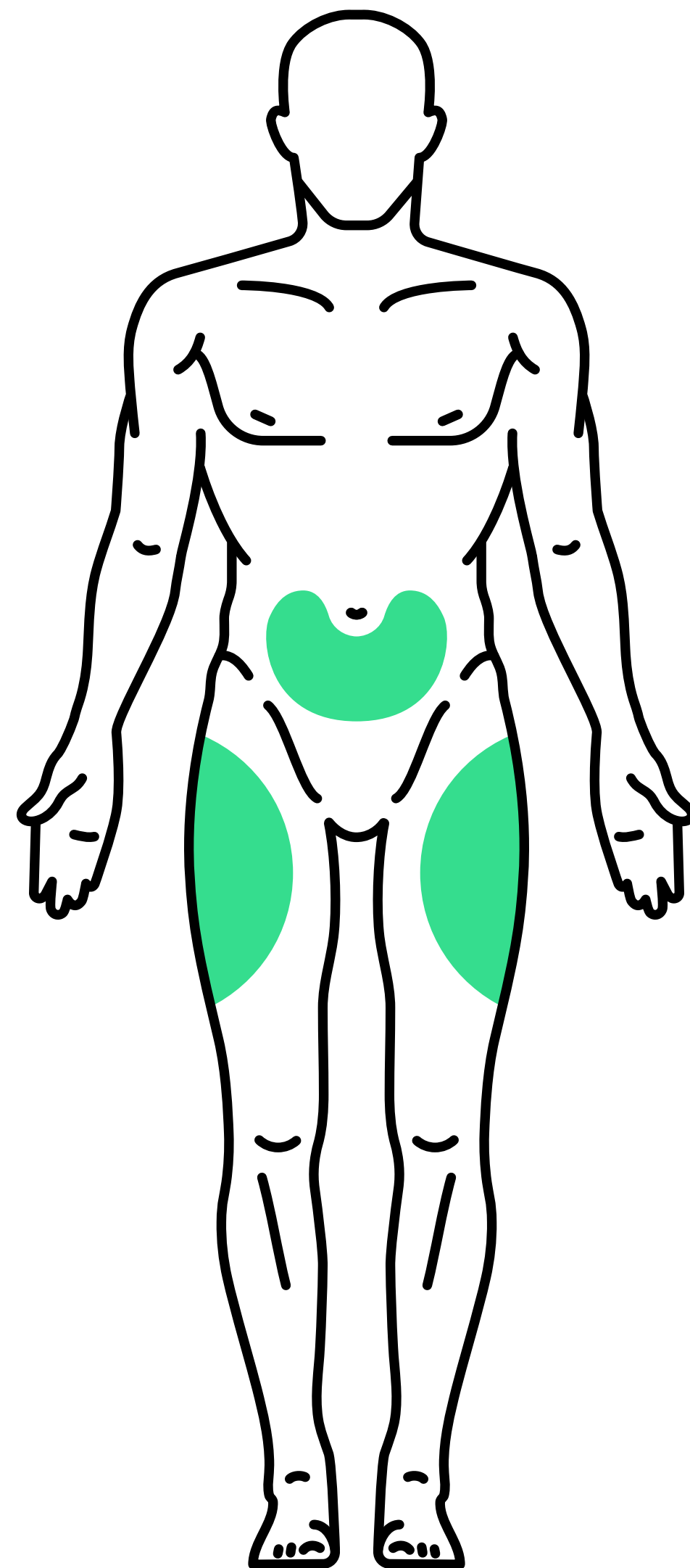


Выберите место введения: область брюшной стенки (не менее 5 см от пупка)
или передняя поверхность бедра.
(Области подсвечиваются зелёным).

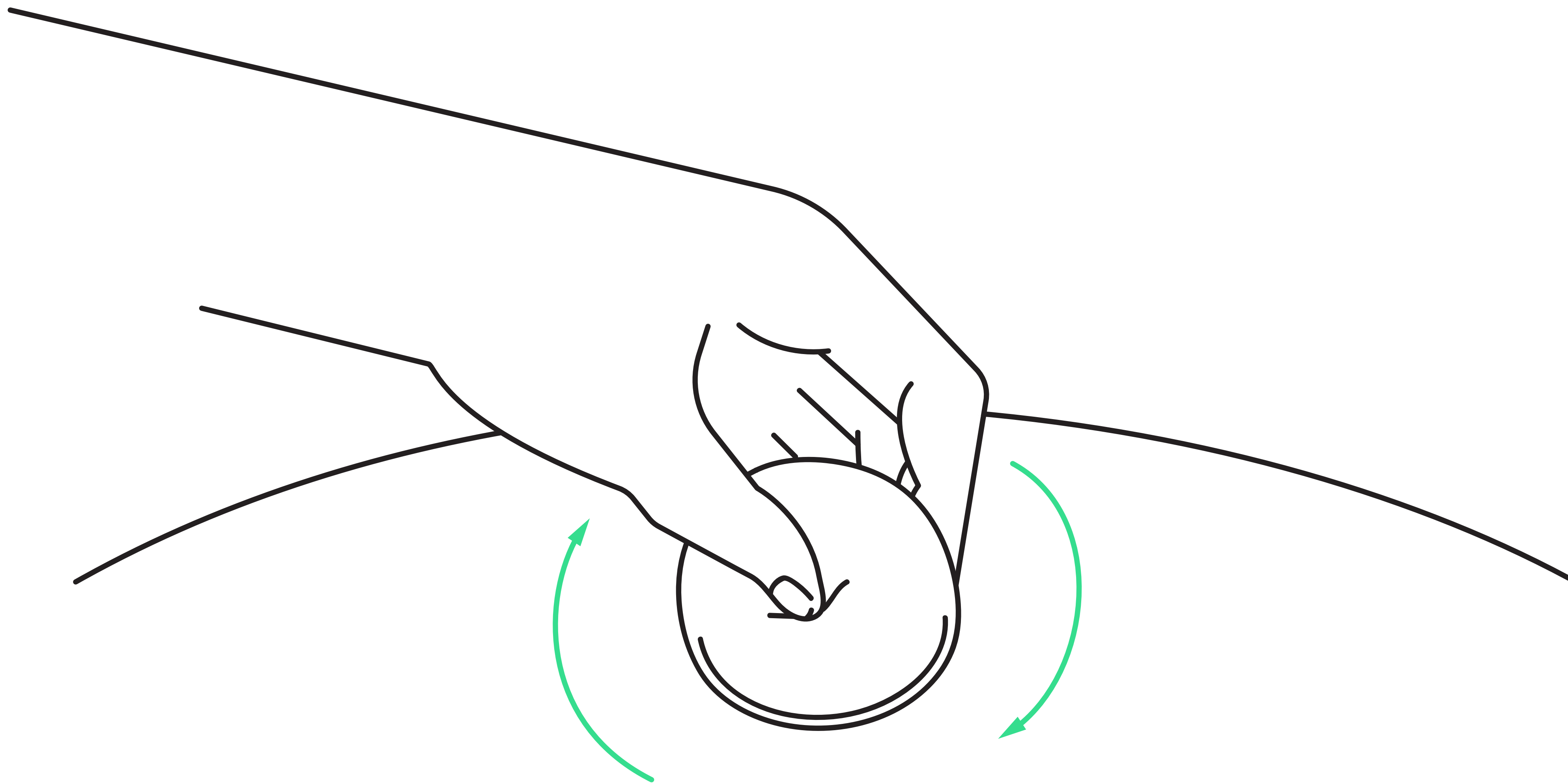


Место для инъекции необходимо обработать спиртовой салфеткой круговыми движениями
(Рука с диском движется вкруговую)

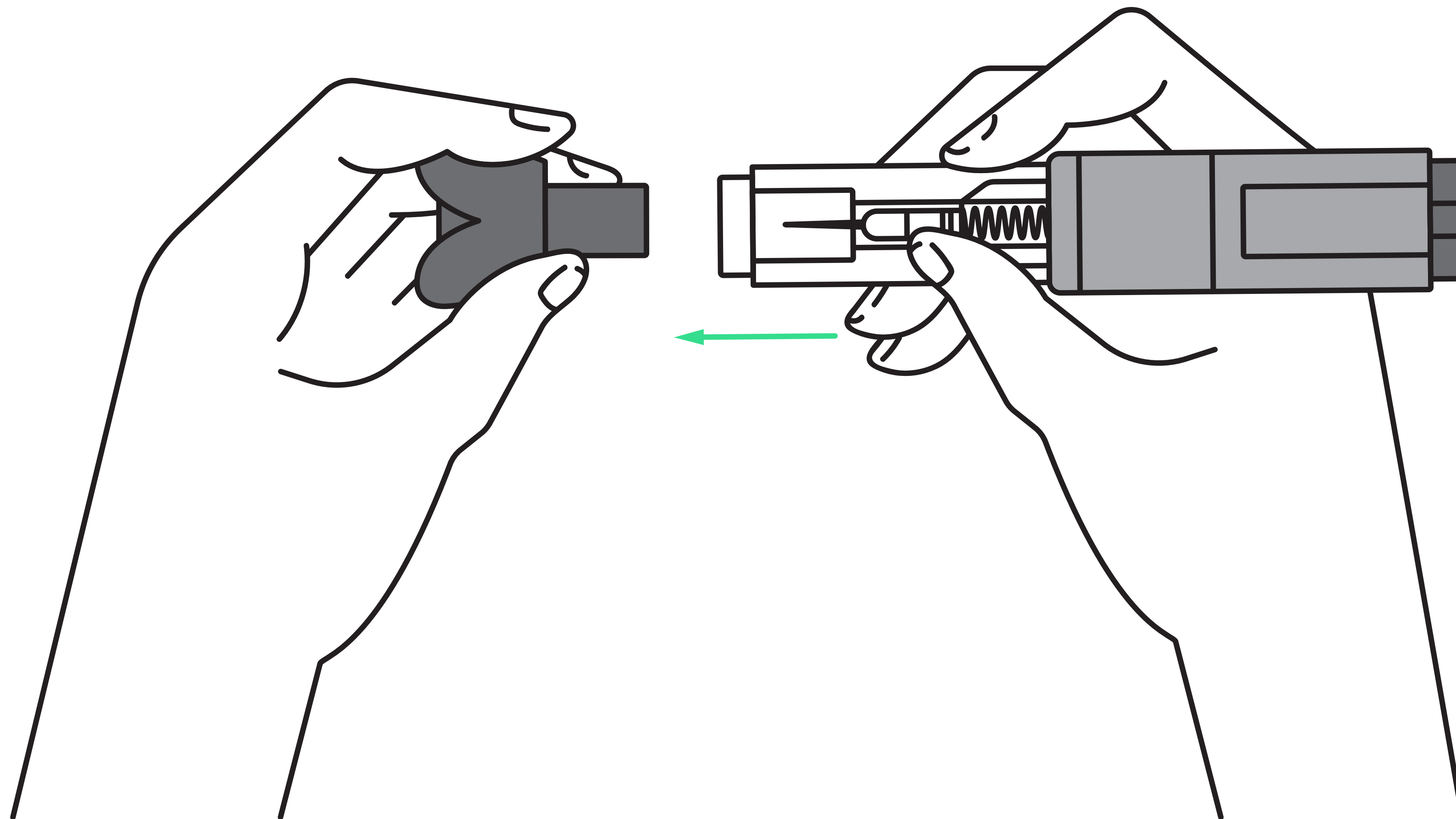


Снимите колпачок с автоинжектора.
(Левая рука с крышкой двигаются влево).

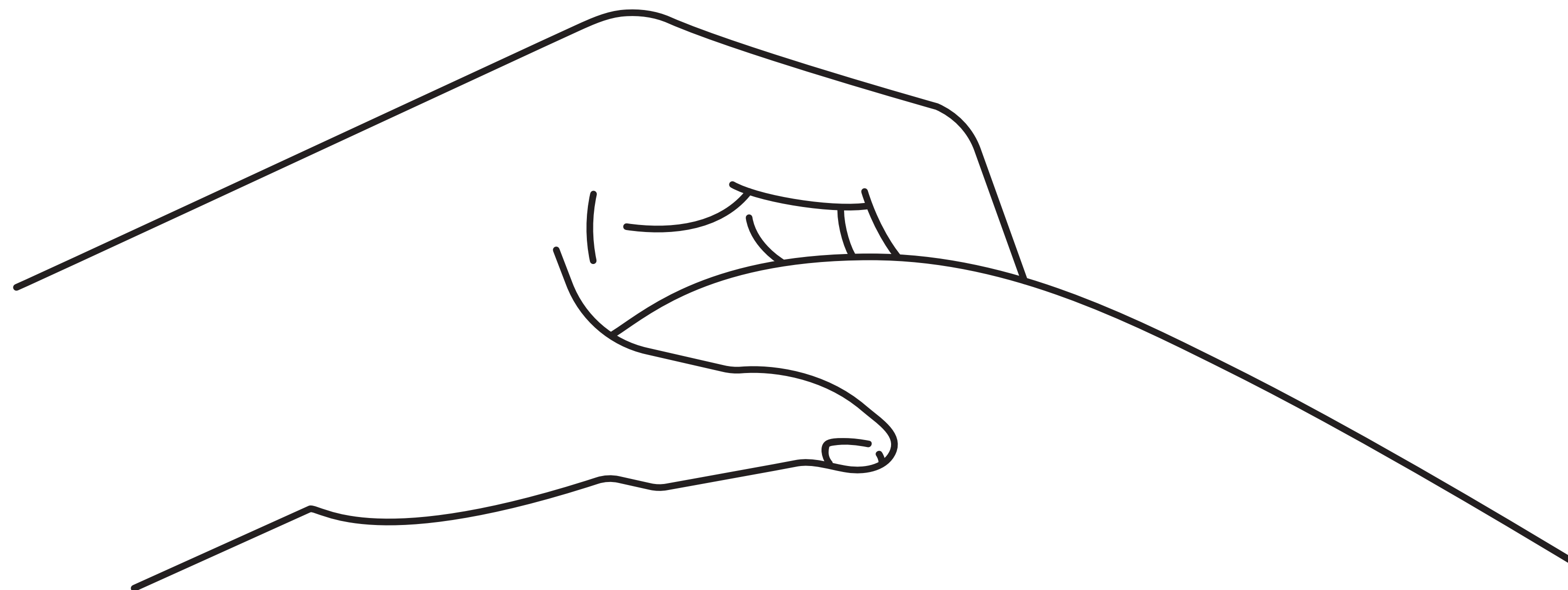


Одной рукой возьмите в складку обработанную спиртовой салфеткой кожу и удерживайте в течение всей процедуры.
(Левая рука слегка поднимается вверх).

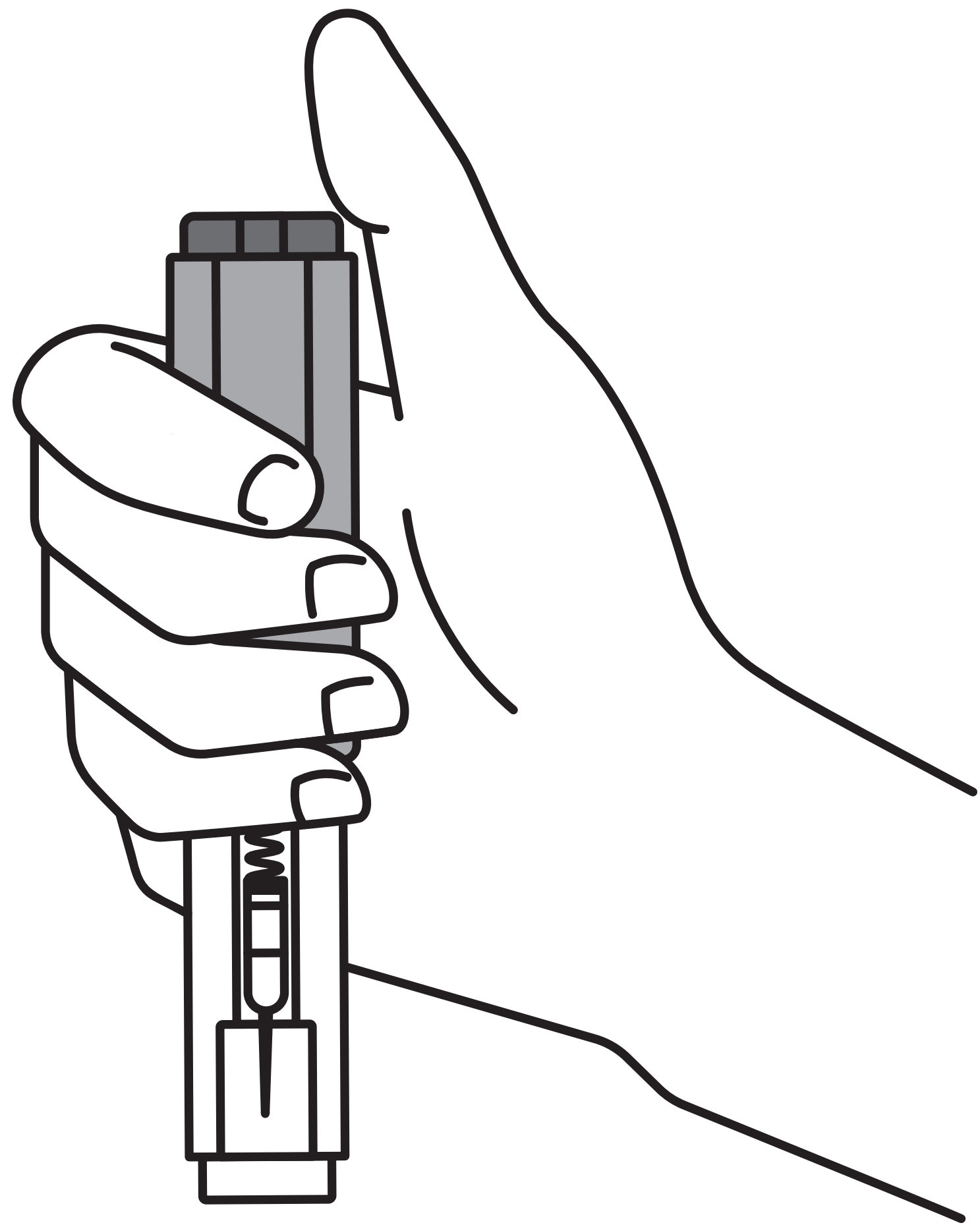


В другую руку возьмите автоинжектор,
держите его за корпус.

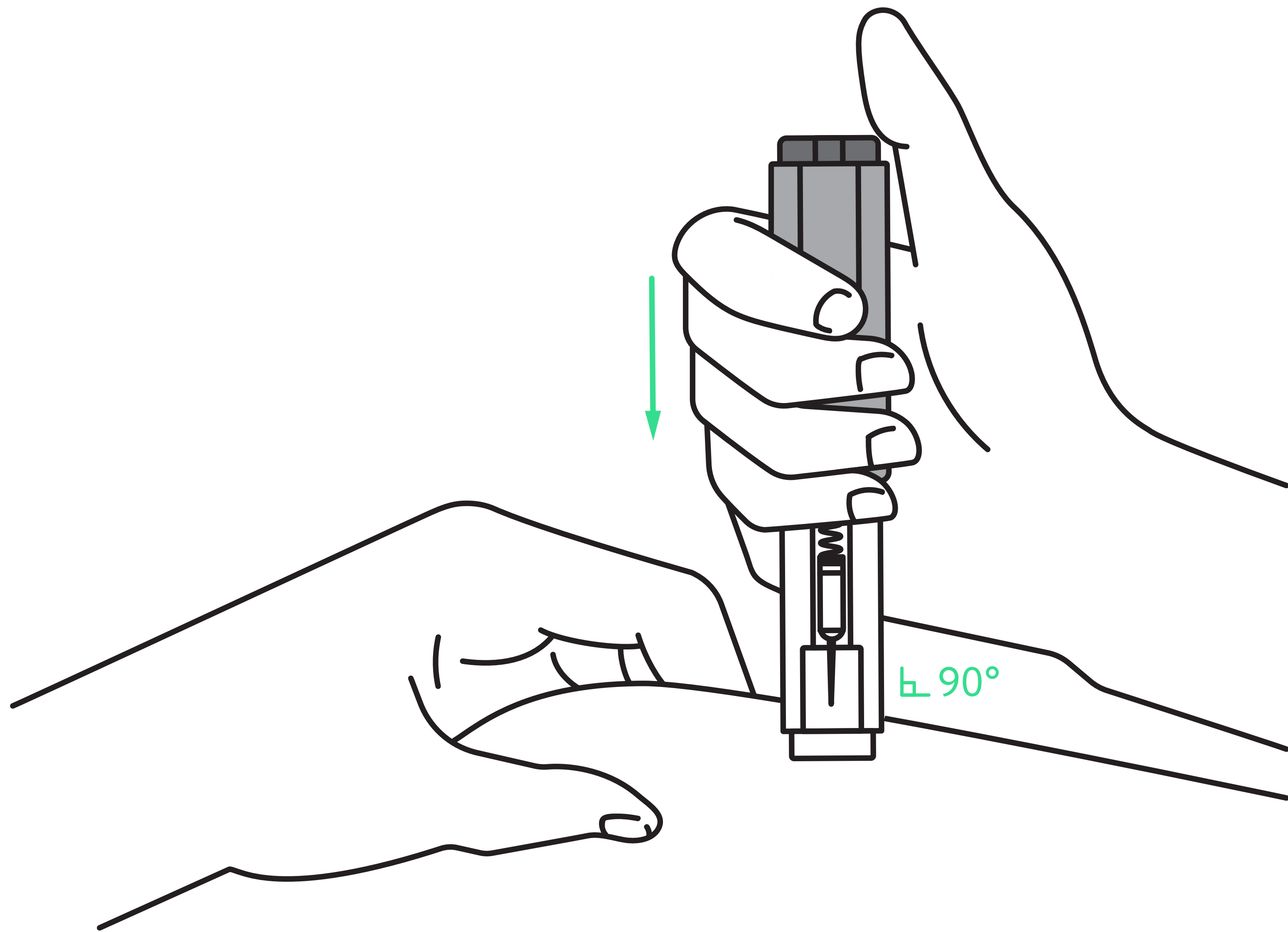


Плотно прижмите автоинжектор под углом
90 градусов к поверхности кожи.
(Правая рука опускается сверху вниз к поверхности кожи).

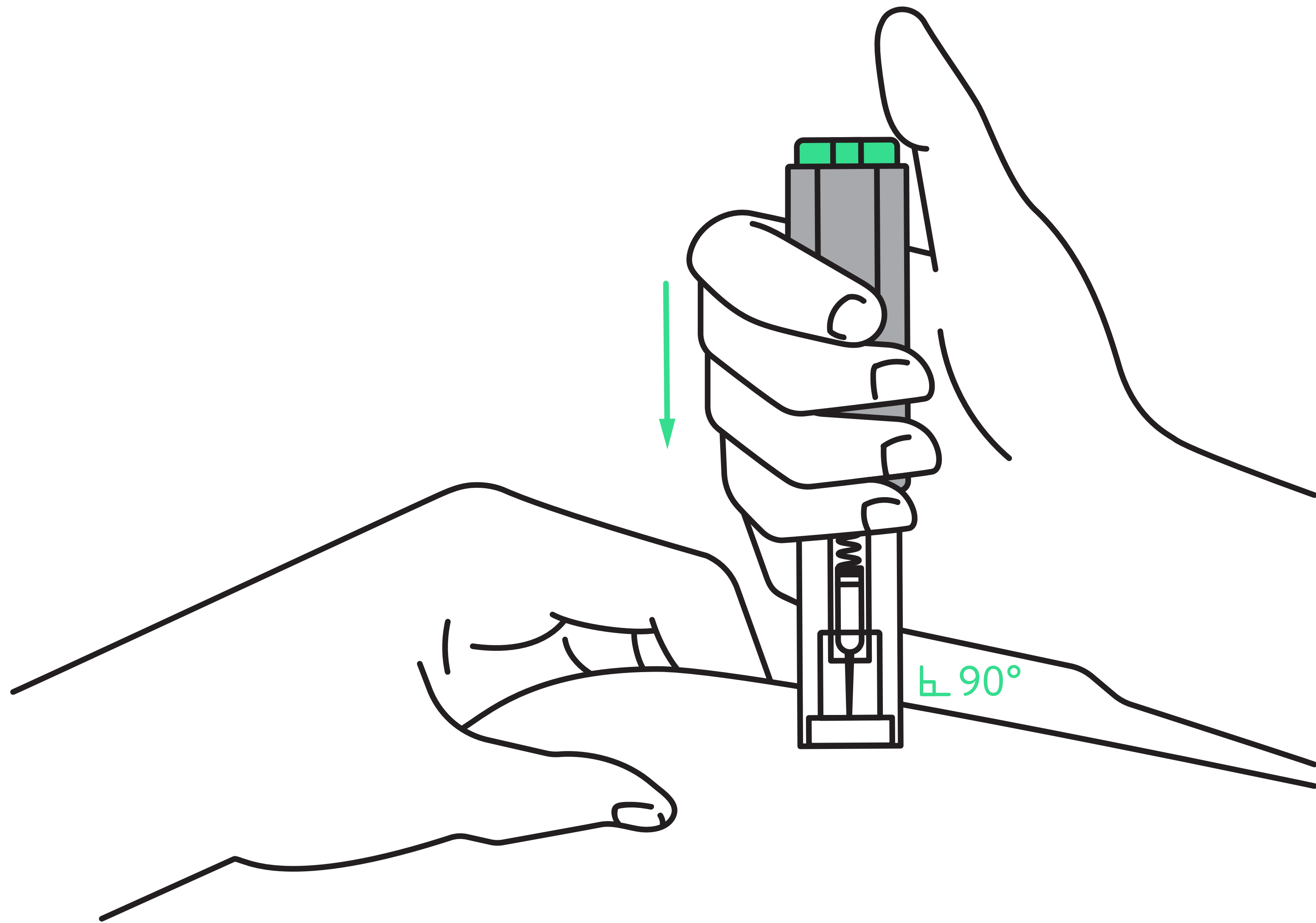


Надавите автоинжектором на кожную складку.
Кнопка, которая отвечает за введение иглы, разблокируется.
(Правая рука и инжектор опускаются. Кнопка подсвечивается зелёным).

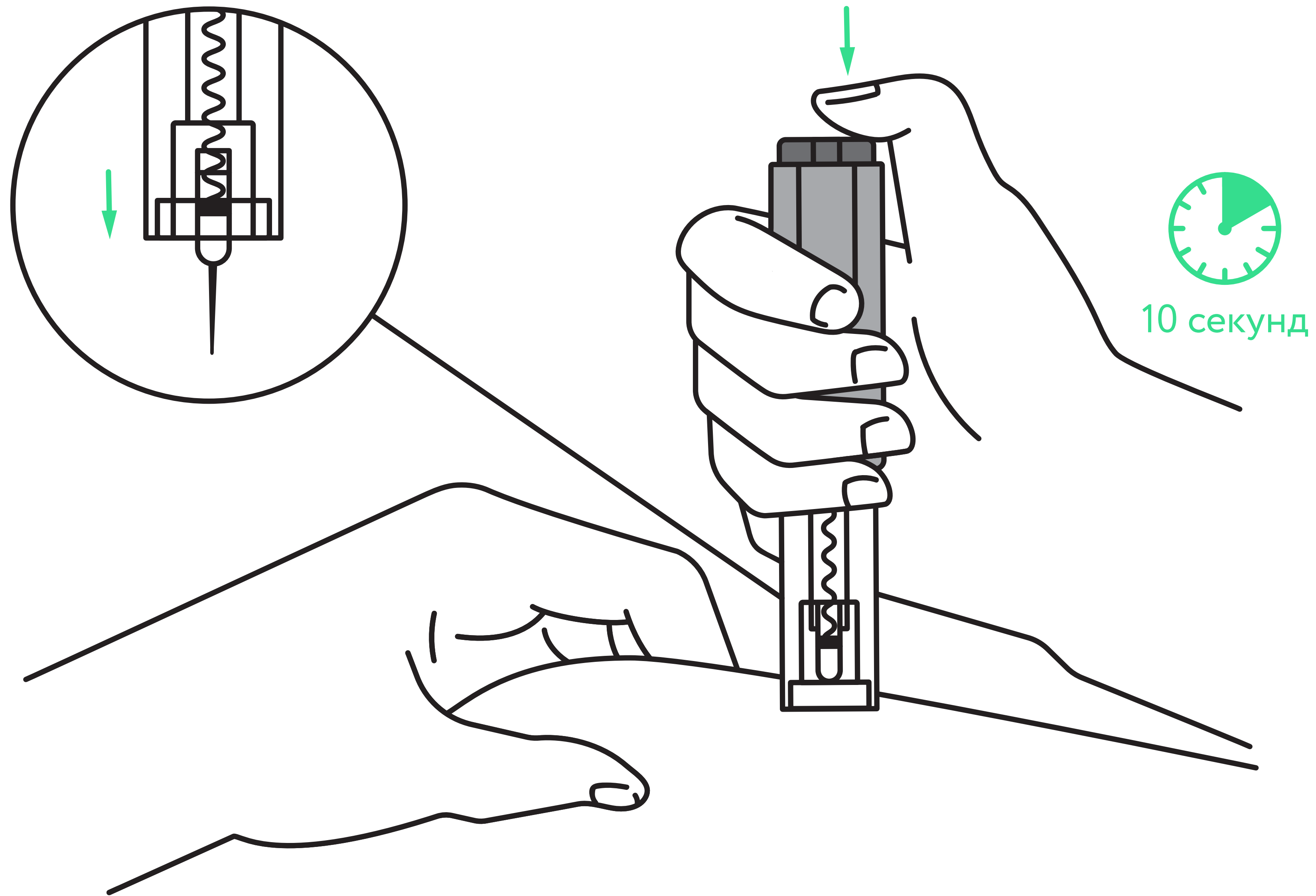

Надавите до упора на кнопку, вы услышите щелчок, указывающий на начало инъекции.
Удерживайте автоинжектор прижатым к коже в течение не менее 10 секунд до окончания инъекции.
(Палец нажимает на кнопку, в бабле пружина распрямляется и давит поршень внутрь капсулы с жидкостью).

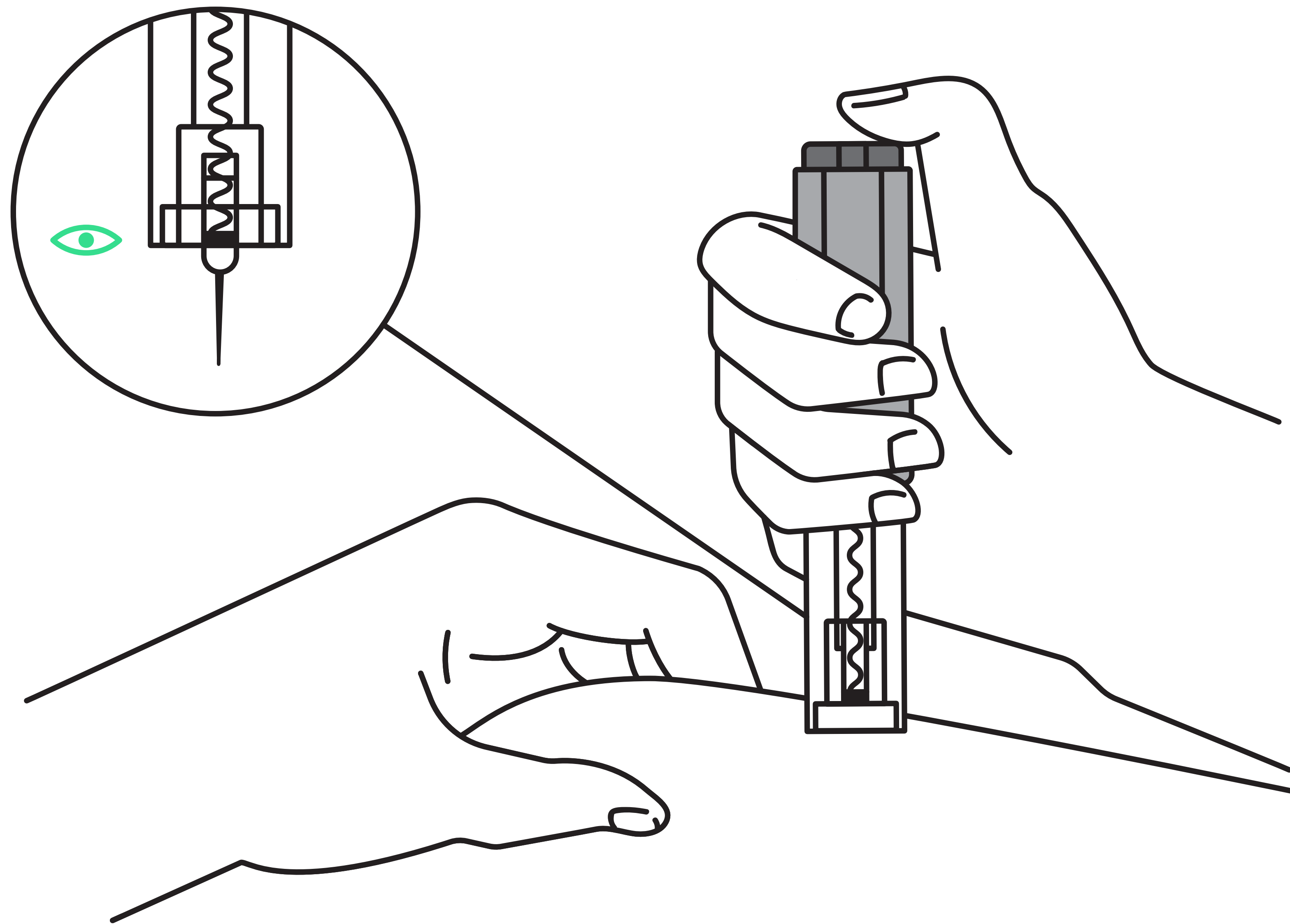


Осмотрев зону контроля, убедитесь, что вся доза препарата введена и контейнер пуст.
(В бабле появляется глазик).

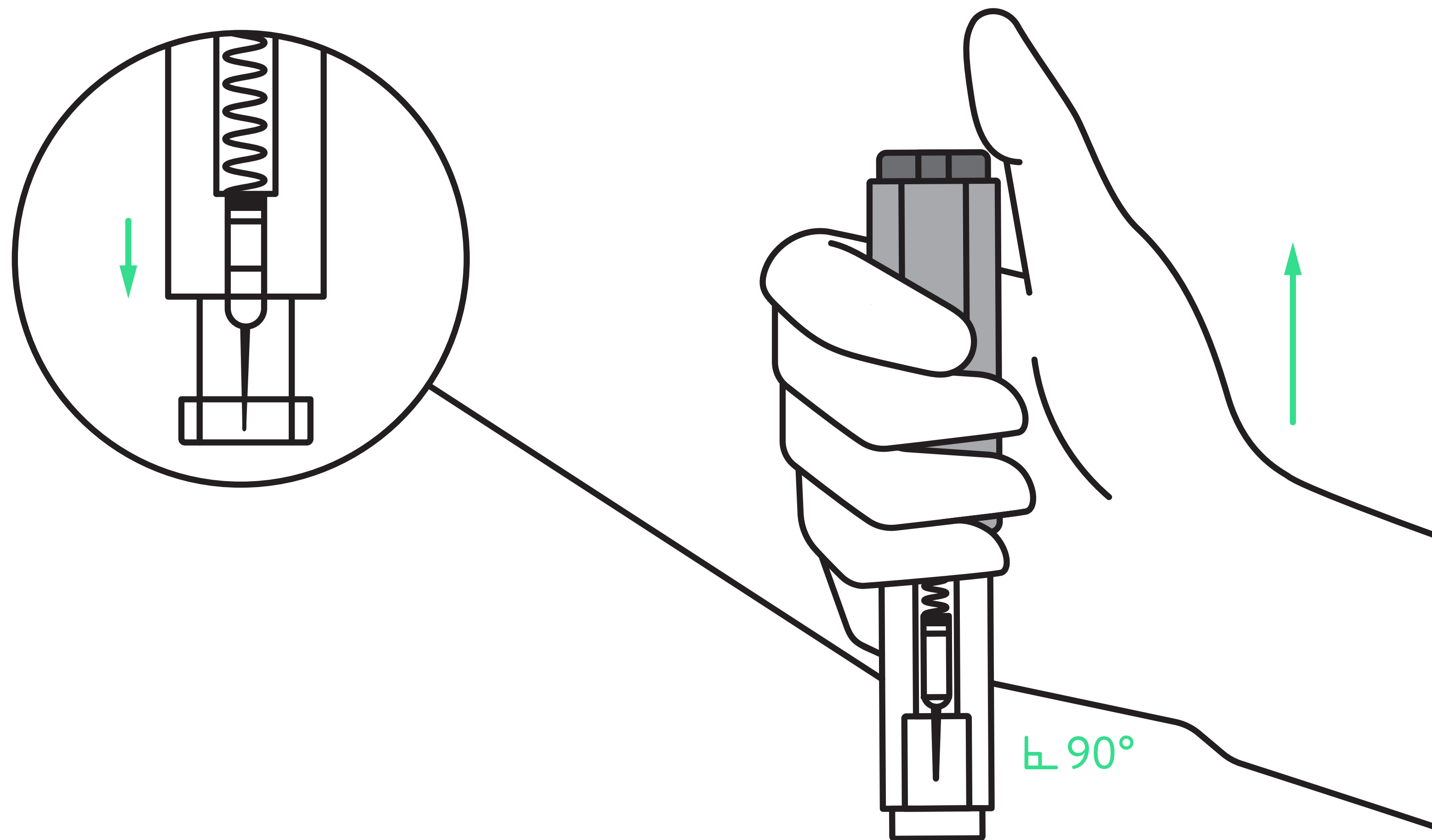

После окончания инъекции извлеките автоинжектор,
игла автоматически закроется защитным цилиндром.

(Рука идёт вверх. В бабле подробно показывается как опускается защитный кожух).

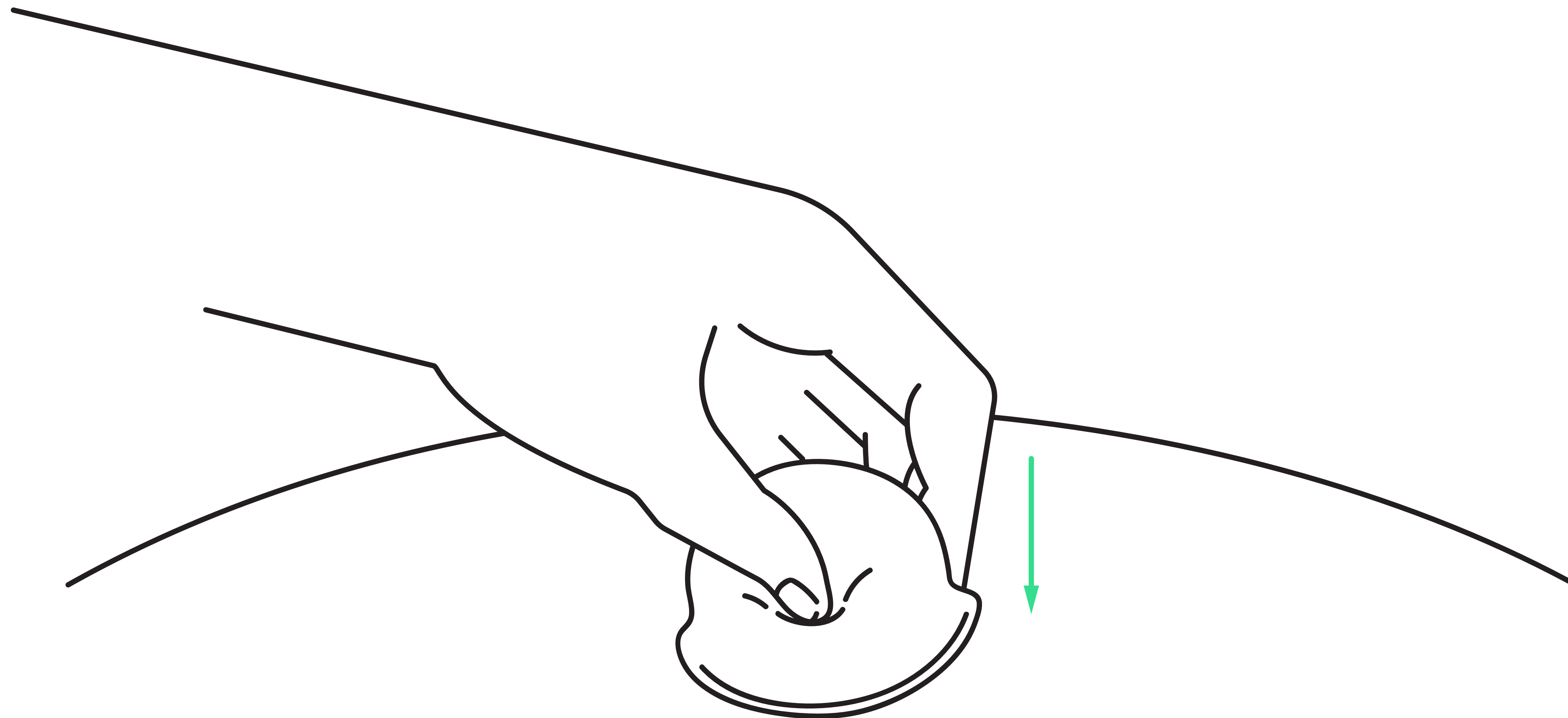


Сухой стерильной салфеткой/ватным шариком слегка прижмите область инъекции, не растирая кожу.

Из места инъекции может выделиться небольшое количество крови.

При необходимости можно воспользоваться пластырем

(Рука с диском идет сверху вниз и останавливается)

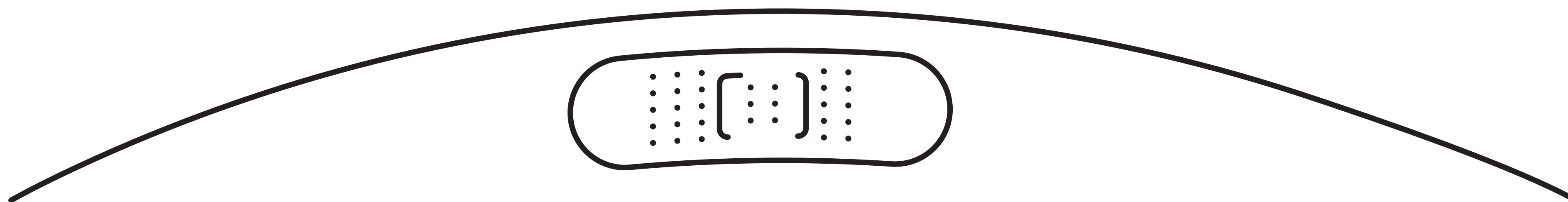


Сухой стерильной салфеткой/ватным шариком слегка прижмите область инъекции, не растирая кожу.


Из места инъекции может выделиться небольшое количество крови.

При необходимости можно воспользоваться пластырем


(Рука с диском идет сверху вниз и останавливается)

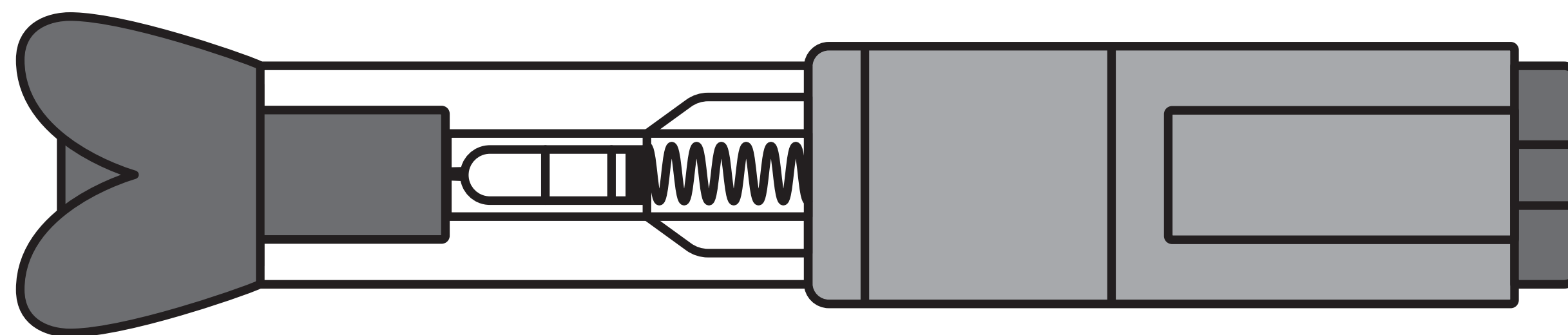

Введите вторую дозу препарата аналогичным образом. Предпочтительно выбрать ту же анатомическую область (не ближе 3 см от места предыдущей инъекции)
(Появляется второй инжектор).

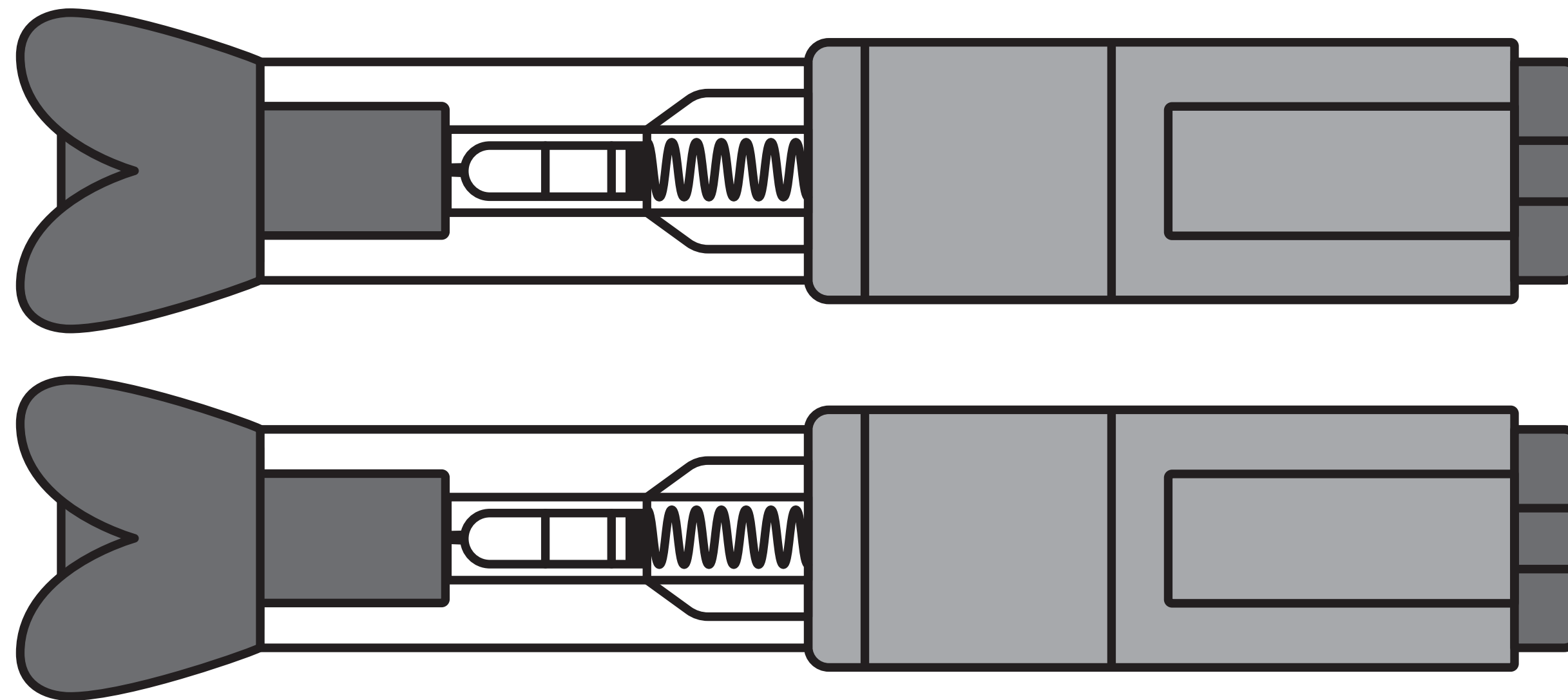


Введите вторую дозу препарата аналогичным образом. Предпочтительно выбрать ту же анатомическую область (не ближе 3 см от места предыдущей инъекции)
(Появляется второй инжектор).

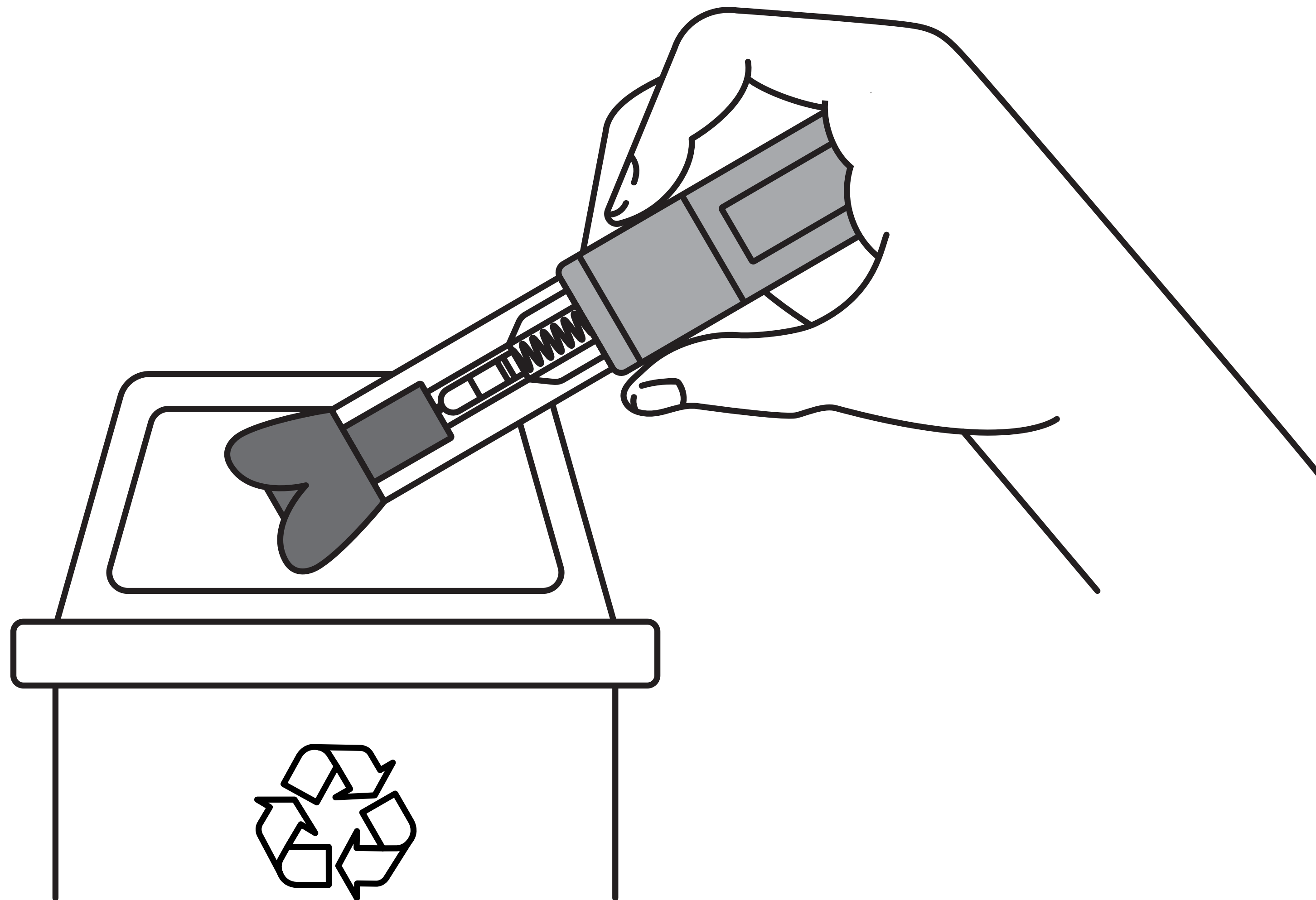

После инъекции автоинжектор повторно не использовать! Использованные автоинжекторы, салфетки/ватные тампоны и другие расходные материалы подлежат утилизации с применением закрывающегося, устойчивого к проколам контейнера для острых предметов из пластика или стекла.

Не допускайте хранения использованных автоинжекторов в местах, доступных для детей!


(Рука подносится к ведру).

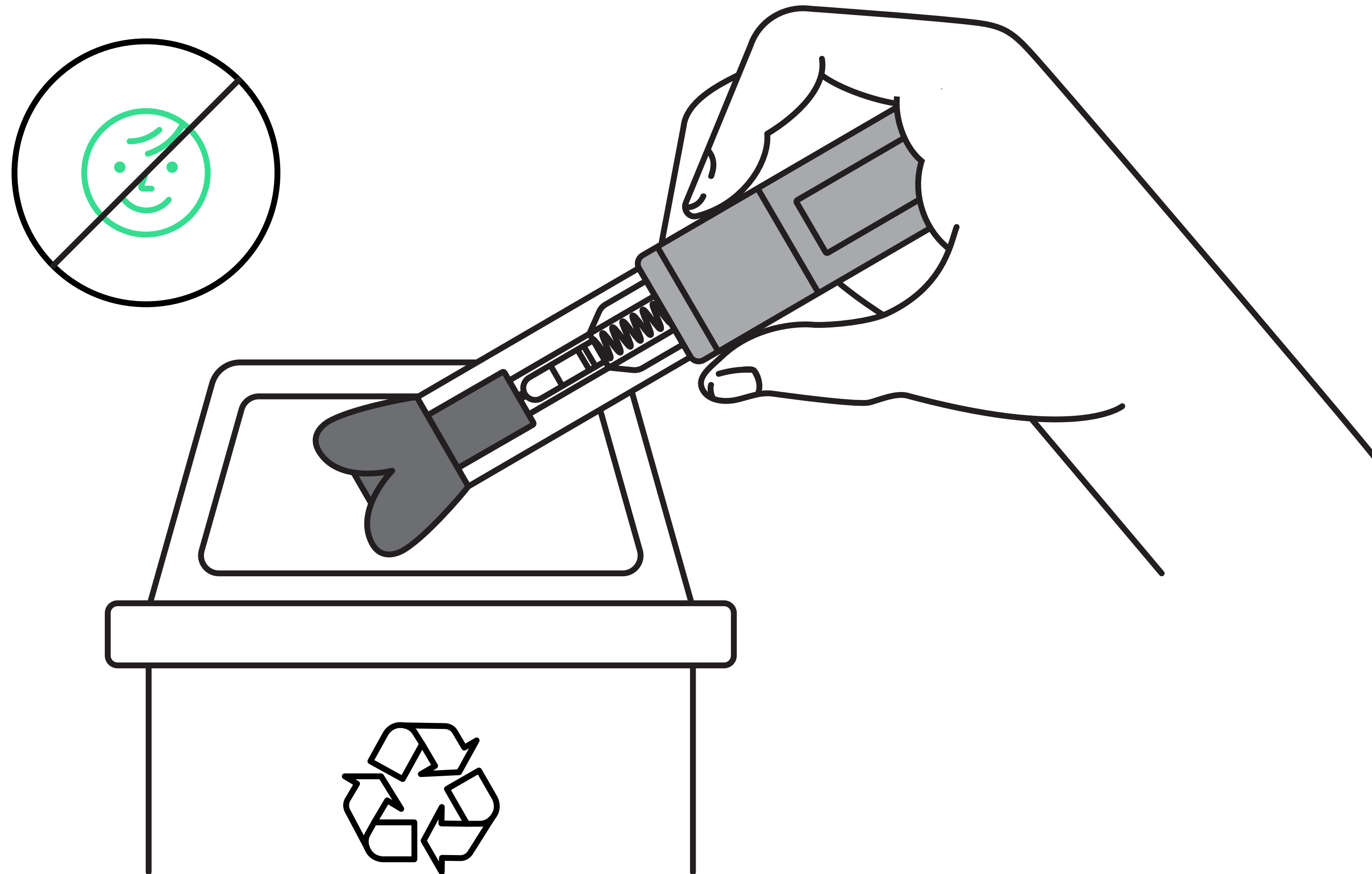


После инъекции автоинжектор повторно не использовать! Использованные автоинжекторы, салфетки/ватные тампоны и другие расходные материалы подлежат утилизации с применением закрывающегося, устойчивого к проколам контейнера для острых предметов из пластика или стекла.

Не допускайте хранения использованных автоинжекторов в местах, доступных для детей!


(Появляется знак «Дети» и затем перечёркивается).

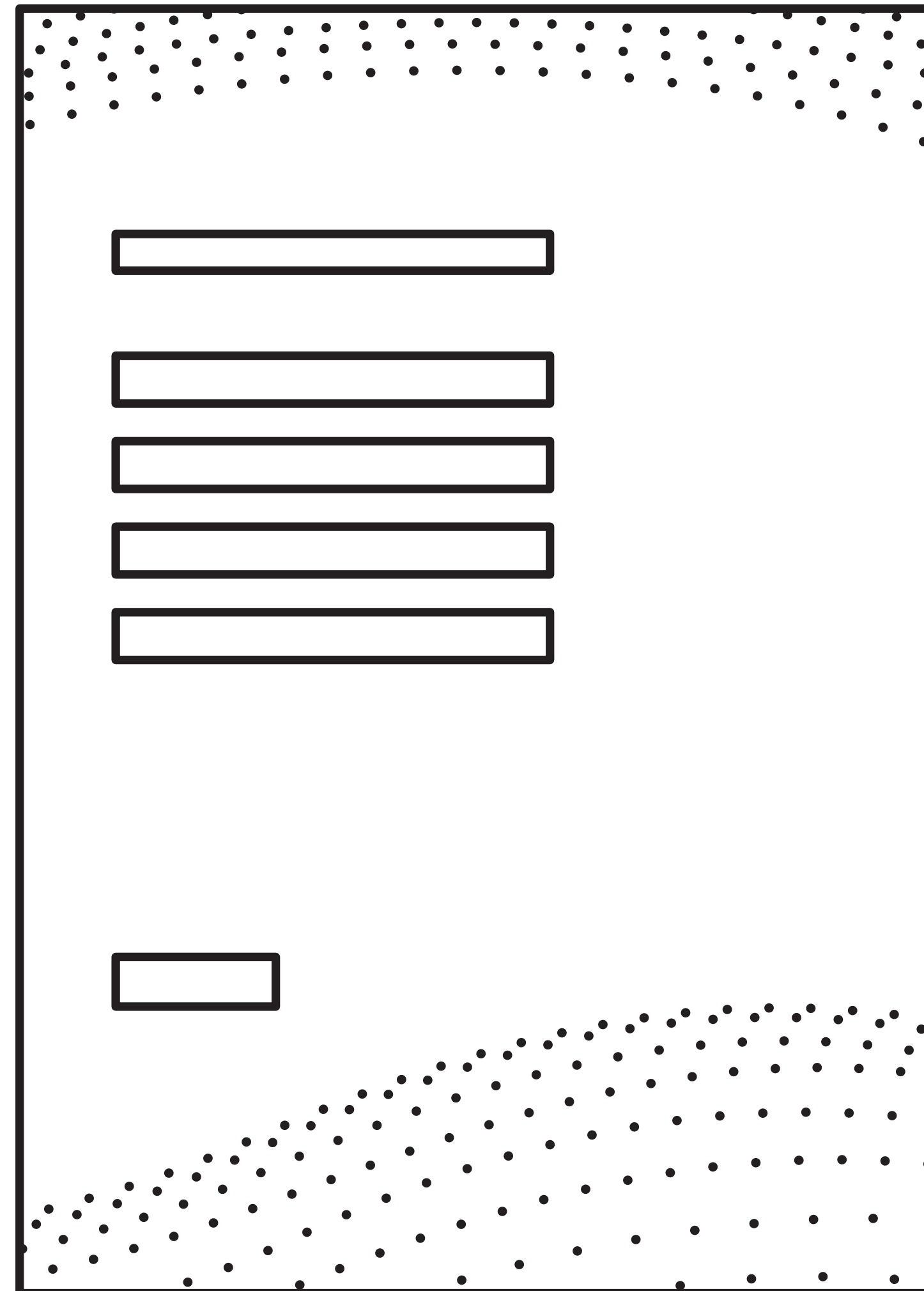


Подробная техника выполнения подкожной инъекции описана
в инструкции по медицинскому применению препарата

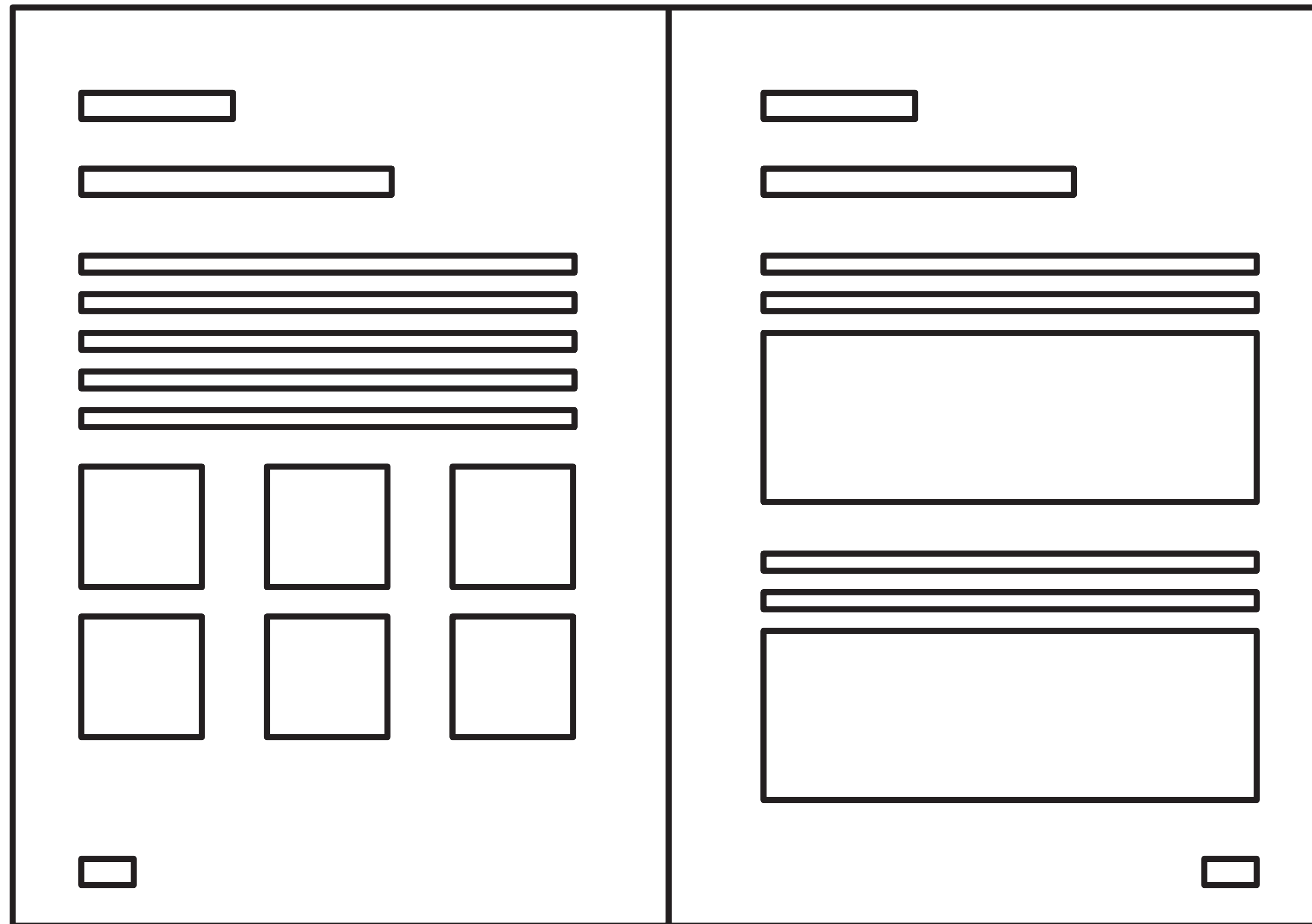


Подробная техника выполнения подкожной инъекции описана
в инструкции по медицинскому применению препарата.
(Страницы инструкции перелистываются).

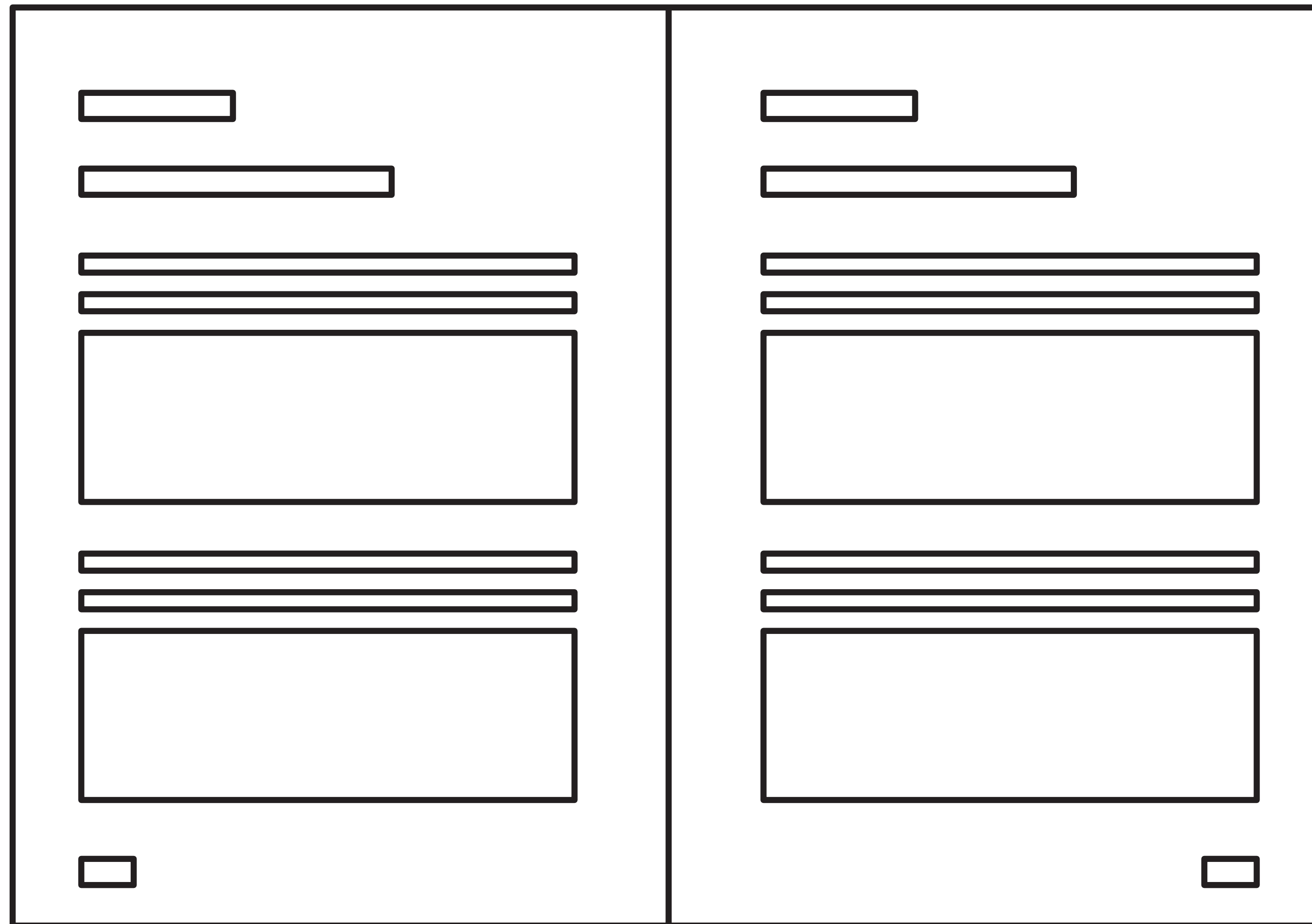

Подробная техника выполнения подкожной инъекции описана
в инструкции по медицинскому применению препарата.
(Страницы инструкции перелистываются).

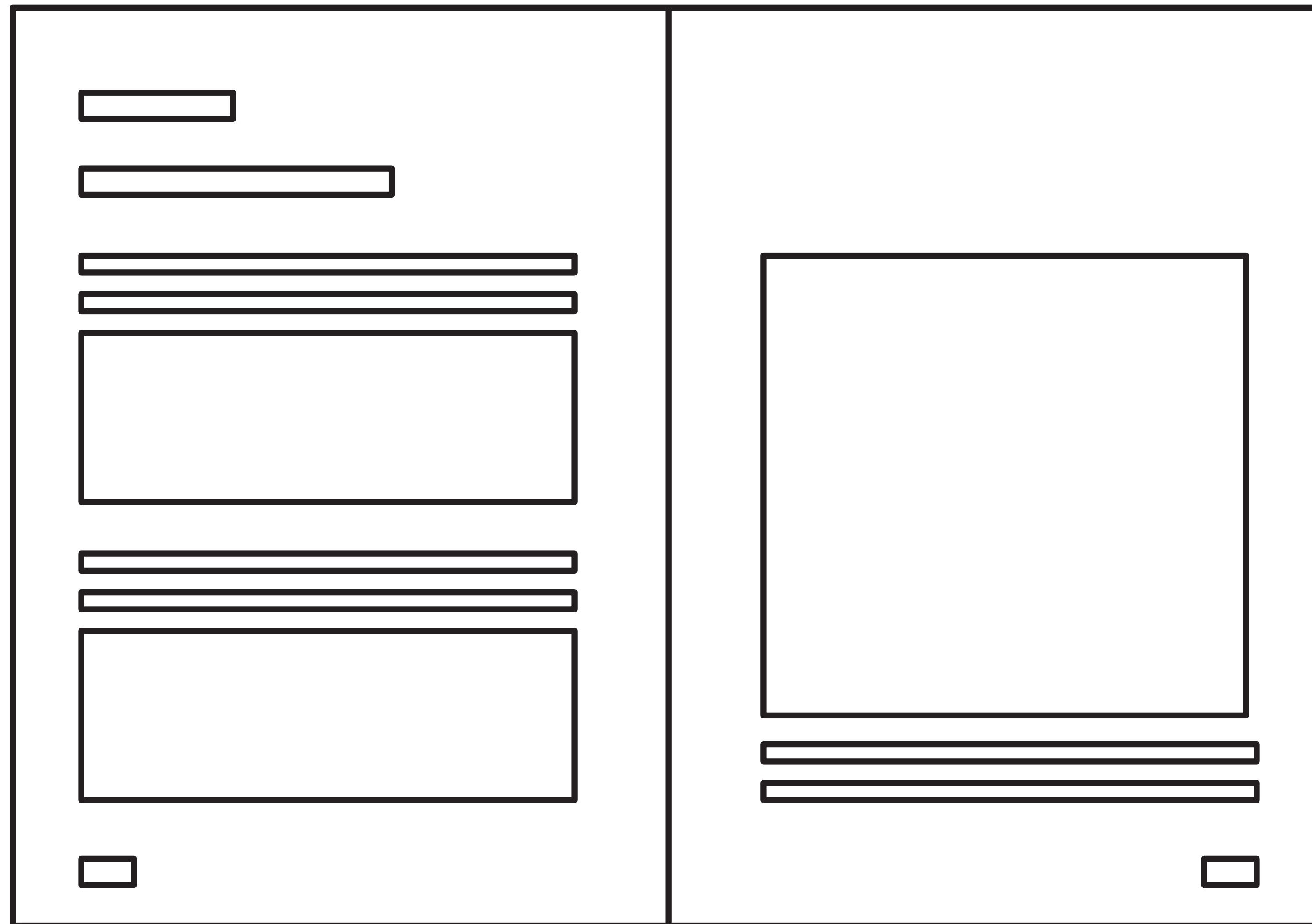

Подробная техника выполнения подкожной инъекции описана
в инструкции по медицинскому применению препарата.
(Страницы инструкции перелистываются).

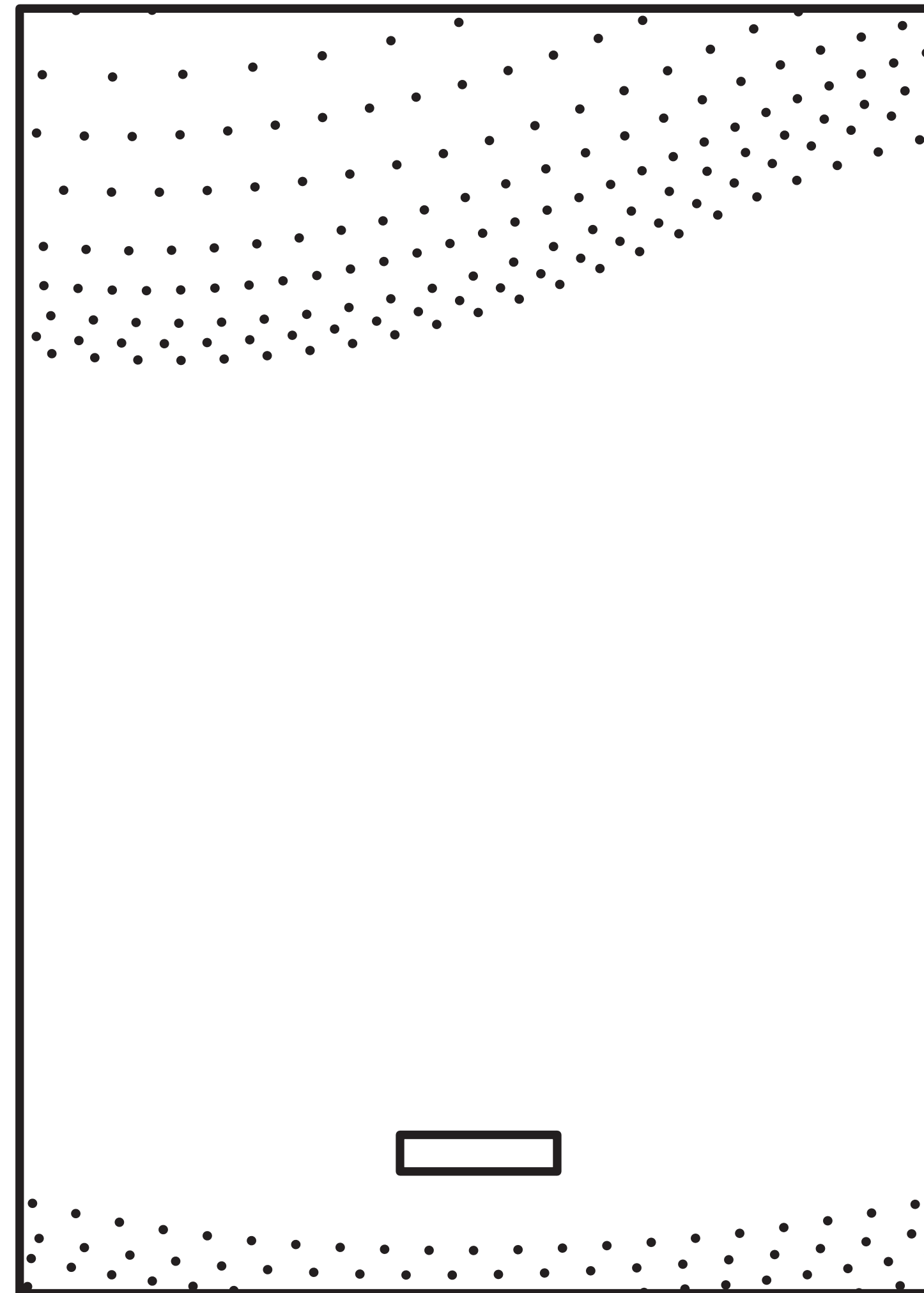

Подробная техника выполнения подкожной инъекции описана
в инструкции по медицинскому применению препарата.
(Брошюра закрывается).